

## Soulève personne DK



PIMAS (Soulève personne DK)

Résumé : Le soulève-personne DK permet à une tierce personne de soulever, à l'aide d'un bras articulé motorisé et d'un système de sangle, une personnes de son fauteuil roulant et de l'installer à l'intérieur d'un véhicule...

## Soulève personne DK

Le **soulève-personne DK** permet à une tierce personne de soulever, à l'aide d'un bras articulé motorisé et d'un système de sangle, une personnes de son fauteuil roulant et de l'installer à l'intérieur d'un véhicule.

### UTILISATION

- A l'aide du bras électrique, soulever la personne du fauteuil roulant,
- Faire pivoter une première fois au passage de porte,
- Une deuxième fois au-dessus du siège passager avant,
- Descendre électriquement la personne sur le siège du véhicule,
- Décrocher la sangle,
- Oter le bras articulé de son support et le ranger dans le coffre,
- Mettre la ceinture de sécurité, fermer la portière.
- Manœuvre inverse pour sortir du véhicule.

Une commande électrique par fils assure le confort d'utilisation.

Le bras articulé peut être désolidarisé de la base fixée sur le véhicule.

Plusieurs modèles de sangles sont disponibles.

De nombreux véhicules peuvent recevoir cet équipement.

Conforme aux normes CE. Directive 93/42/CEE.



## **Informations et liens complémentaires :**

- [Visitez le site Pimas](#)