

# Les sangles techniques

## Les sangles post-opératoires pour patient amputé

Les sangles post-opératoires pour patient amputé sont utilisées dans le cadre d'amputation longue ou courte d'un membre inférieur.



Sangle post-opératoire de pose de prothèse-amputation - Réf. 961.93.601 M

Pour des pathologies particulières PRAXIS propose d'autres sangles techniques adaptées.

## Entretien et désinfection des sangles

- LE CIRCUIT DE LAVAGE EST LE CIRCUIT A PART, SANS VISE SOUS FILET, afin de permettre un lavage SANS SECCHAGE. La température de lavage peut être portée à 60° avec des produits désinfectants standard.
- CAUTION CLAVES, LES TUNNELS DE LAVAGE ET LE SECHE-LINGE SONT A PROSCRIRE AFIN DE NE PAS DÉTERIORER LES SANGLES.

Les sangles en coton humides par les tunnels de lavage et l'opération de séchage sont la cause de risques d'escarres pour le patient et ne peuvent absolument plus être utilisés.


Les sangles en polyuréthane et en polyester sont au contraire « ramollies » par les opérations de séchage et perdent de leur efficacité, de leur stabilité et provoquent un effet de cisaillement.

- LE SECCHAGE DOIT SE FAIRE À PLAT, SANS SECHE-LINGE.

- en cas d'infection sévère, les sangles doivent être changées, la température de lavage ne pouvant excéder 60°.

## Jeu de sangles nursing

Les sangles s'utilisent en position allongée, facilitent la toilette et permettent la mise en place d'un bassin.

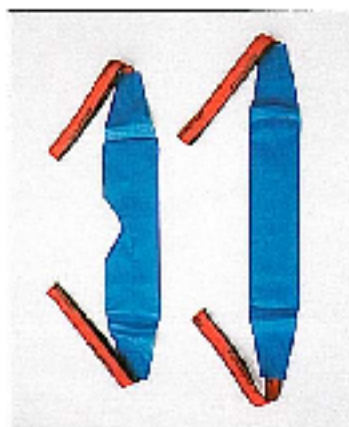

JEU de sangles de lavage en vinyle  
Réf. A30.15.100 S



## Guide indicatif de choix des tailles

Foies kg	A cm	T cm	
Large (L)	50-60	67	50
Moyen (M)	45-55	59	47
Small (S)	25-30	44	39

Le choix de la taille est fonction du poids et de la morphologie du patient.

Code des tailles :

S = Petit, M = Moyen, L = Grand,  
XL = très Grand, XXL = Obèse.