


### Caractéristiques

- Tissu élastique aéré Combitec 2® (breveté)
- Bandes de tissu croisées (analogie fonctionnelle musculaire)
- Baleinage postérieur rigide et anatomique
- Dispositif auxiliaire réglable renforçant la contention dorsale
- Découpe anatomique pour plus de confort, notamment pour la femme
- Passe-doigts sur sangles additionnelles facilitant leur mise en place
- Passants sur sangles additionnelles facilitant leur préhension

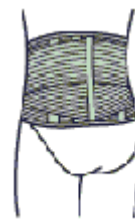

### Indications

- Maintien post-interventionnel
- Maintien post-immobilisation (corset)
- Lombalgies subaigues ou chroniques
- Lombo-sciatiques subaigues ou chroniques
- Lombo-sciatalgies subaigues ou chroniques
- Lombalgies aiguës
- Lombo-sciatiques aiguës
- Lombo-sciatalgies aiguës
- Lumbago aigu
- Rééducation fonctionnelle et reprise d'activité

### Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Ceinture de Soutien Lombaire, hauteur 26 cm LMPP (Titre II - Chapitre 1er - E)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201E00.022
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
beige	0 EUR
blanc	0 EUR
noir	0 EUR

### Tailles et modèles

Tour de taille



Modèle : beige

Tour de taille	Taille	Référence
52 - 62 cm	1	7928219
63 - 74 cm	2	7928225
75 - 89 cm	3	7928231
90 - 105 cm	4	7928248
106 - 120	5	7928254
121 - 140 cm	6	7928260


### Conseils d'utilisations

Pose:

- 1- Décrochez les sangles auto-agrippantes latérales.
- 2- Revêtir la ceinture, étiquette intérieure vers le haut.
- 3- À l'aide du passe-main, fermer la patte auto-agrippante ventrale en ajustant à la contention désirée.
- 4- Ajuster le maintien dorsal en fixant sur le devant les sangles additionnelles latérales à l'aide des passe-doigts.

---

#### Autres

- Composition :  
29% polyamide - 29% polyester - 24% viscose - 18 % élasthane guipé
- Entretien : 
  - Laver à la main et à l'eau savonneuse.
  - Essorer par pression.
  - Sécher à l'air libre loin d'une source de chaleur





ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219105734+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219105734+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-