

Caractéristiques

- Tissu élastique aéré Combitec (breveté)
- Bandes de tissu croisées (rappel postural dynamique) (1)
- Baleinage antérieur et postérieur (2)
- Renfort anatomique intégrant le baleinage postérieur, avec surface à plots pour effet de massage (3)



Indications

- Maintien post-interventionnel
- Maintien post-immobilisation (corset)
- Lombalgies aiguës
- Lombo-sciatiques aiguës
- Lombo-sciatalgies aiguës
- Lumbago aigu
- Rééducation fonctionnelle et reprise d'activité

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Ceinture de Soutien Lombaire, hauteur 26 cm LMPP (Titre II - Chapitre 1er - E)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201E00.022
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de taille



Modèle : standard

tour de taille	taille	coloris	Référence
52-62 cm	1	blanc	7910768
63-74 cm	2	blanc	7910774
75-89 cm	3	blanc	7910780
90-105 cm	4	blanc	7910797
106-120 cm	5	blanc	7910805
121-140 cm	6	blanc	7910811

Conseils d'utilisations

Pose:

- 1- positionner le renfort avec l'auto-agrippant, verticalement, bien centré sur la partie dorsale, partie large près de l'étiquette de la ceinture
- 2- revêtir la ceinture, étiquette intérieure vers le haut
- 3- maintenir l'extrémité gauche avec la main gauche à plat
- 4- mettre l'auto-agrippant en ajustant à la contention désirée (l'auto-agrippant bien placé ne présente pas de plis)

Autres

- Composition :
polyamide 43% - elasthane guipé 25% - coton 16% - polyester 16%

- Entretien :



enlever le renfort avant le lavage (non lavable)

ceinture: essorer par pression. sécher loin d'une source de chaleur



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219105807+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219105807+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-