

## Caractéristiques

- Des bretelles amovibles très pratiques (1)
- Des baleines recentrées sur le rachis pour un meilleur maintien (2)
- Des sangles additionnelles fortes pour plus de contention (3)
- Adaptabilité morphologique : nouvelle découpe anatomique
- Un insert cache baleine avec picots pour effet massant
- Des passe-mains et passe-doigts facilitant la préhension de la ceinture
- Un nouveau design : nouvelle forme et nouvelles couleurs plus modernes



## Indications

- Maintien post-interventionnel
- Maintien post-immobilisation (corset)
- Lombalgies subaigues ou chroniques
- Lombo-sciatiques subaigues ou chroniques
- Lombo-sciatalgies subaigues ou chroniques
- Lombalgies aiguës
- Lombo-sciatiques aiguës
- Lombo-sciatalgies aiguës
- Lumbago aigu
- Rééducation fonctionnelle et reprise d'activité

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Ceinture de soutien lombaire, hauteur 26 cm - LMPP (Titre II - Chapitre 1er - E)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201E00.022
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
Standard	0 EUR

## Tailles et modèles

Tour de taille



Modèle :

Tour de taille	Taille	Coloris	Référence
76 - 90 cm	1	Gris	7911029
91 - 110 cm	2	Gris	7911035
111 - 125 cm	3	Gris	7911041

## Conseils d'utilisations

Première Pose:

- décrocher les pattes auto-agrippantes latérales
- conformer les baleines
- revêtir la ceinture, étiquette intérieure vers le haut
- la fermer au moyen de la patte auto-agrippante ventrale
- ajuster le maintien dorsal en fixant les pattes auto-agrippantes latérales
- positionner les bretelles et les régler

Par la suite:

- les différents réglages étant alors parfaitement adaptés, mettre et retirer la ceinture simplement avec la patte ventrale

Lorsque la contention n'est temporairement plus nécessaire, il est possible de garder la ceinture sur soi grâce aux bretelles.

---

### Autres

■ Composition :  
polyester 47% - élastodiène guipé 32% - viscose 21%

■ Entretien :



essorer par pression. sécher loin d'une source de chaleur.



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219105953+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219105953+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-