


Caractéristiques

- Placement parfait au niveau thoracique: - échancrures sous l'aisselle, - bretelles (amovibles) permettant le bon positionnement
- Tissu élastique aéré Combitec (breveté), facilitant l'évacuation de la transpiration
- Réglage par tissu auto-agrippant
- Hauteur 25 cm

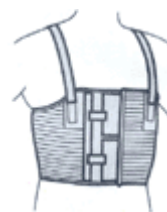

Indications

-


Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement :
- Référence(s) Sécurité Sociale :
- TVA 19.6 %

| Modèle | Tarif resp. TTC |
|----------|-----------------|
| standard | 0 EUR |

Tailles et modèles

Tour de thorax

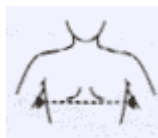

Modèle : standard

| Tour de thorax | Taille | Coloris | Référence |
|----------------|--------|---------|-----------|
| 81-93 cm | 1 | blanc | 7684912 |
| 94-105 cm | 2 | blanc | 7684929 |
| 106-120 cm | 3 | blanc | 7684935 |
| 121-130 cm | 4 | blanc | 7684941 |

Conseils d'utilisations

Mise en place:

- 1- mettre en place les bretelles au niveau du dos avec l'auto-agrippant, et les ajuster sommairement à l'avant
- 2- revêtir la ceinture, avec le tissu éponge posé contre la peau et les échancrures placées sous les aisselles
- 3- mettre en place l'auto-agrippant de la ceinture
- 4- ajuster la tension de la ceinture et des bretelles par retouches successives

Ne pas mettre en place directement sur une plaie sans protection.

Autres

- Composition :
polyamide 43% - elasthan guipe 25% - coton 16% - polyester 16%

■ Entretien :



essorer par pression

sécher loin d'une source de chaleur

Hôpitaux: en cas de besoin, autoclave à 120° possible

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219105400+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219105400+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-