

Caractéristiques

- + EFFICACE
- Coques rigides amovibles.
- Strapping amovible agissant sur l'œdème par contention.
- Double système de fermeture pour obtenir un serrage homogène des deux coques
- + CONFORTABLE
- Partie élastique sur la sangle haute pour prendre en compte la forme du mollet
- Matières fines
- Renforts latéraux en mousse Outlast à propriété thermo-régulatrice absorbant l'excès de chaleur produit par le corps.
- + PRATIQUE
- Pied imprimé pour indiquer le sens de pose
- Coloris sur sangle strapping permettant une mise en place plus lisible

Indications

- Entorses moyennes
- Entorses bénignes

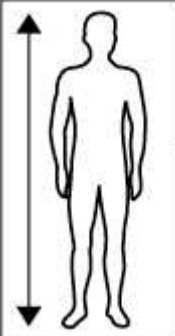
Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : "Orthèse stabilisatrice de cheville" L.P.P.R. (Titre II - Chapitre 1er - G) réf. 31V6 + SV11" L.P.P.R."
- Référence(s) Sécurité Sociale : Réf. S.S. 201G00.18
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
droite	0 EUR
gauche	0 EUR

Tailles et modèles

Entorses graves; Entorses moyennes;
Fractures malleolaires

	Taille Size	Taille Height
	0	< 160 cm
1	> 160 cm	

Modèle : droite

< 160 cm	0	bleu lavande	4347491
> 160 cm	1	bleu lavande	4347522

Conseils d'utilisations

Pose:

1. Ajuster la hauteur de la sangle sous talon de façon à placer les malléoles dans les évidements prévus à cet effet (l'étiquette de taille indique l'arrière de l'orthèse).
2. Positionner le centre de la sangle élastique amovible à l'intérieur, sur le talon de l'orthèse. Cette sangle doit être parallèle au produit posé à plat. Poser le talon sur l'orthèse.
3. Tirer un des côtés de la sangle, la passer sur le cou-de-pied, entourer la cheville et venir la fixer sur le velcro situé à sa base. Répéter la même opération avec le second côté de la sangle.
4. Remonter les 2 montants latéraux, accrocher la sangle du haut en faisant le tour de la jambe, passer la sangle dans la boucle et la serrer en venant s'accrocher sur le velcro.
5. Répéter la même opération avec la sangle inférieure.

Autres

- Composition :
voir étiquette produit

- Entretien :



- Laver uniquement à l'eau savonneuse, sans détergent ni eau de javel.
- Essorer par pression.
- Sécher loin d'une source de chaleur.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219110735+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219110735+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-