

Caractéristiques

- Tissu élastique
- Double sanglage de maintien latéral préservant la flexion-extension
- Sangle de renfort latéral amovible
- Anneau silicone anti-glisse



Indications

- Entorses graves
- Entorses moyennes
- Entorses bénignes
- Laxités chroniques

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur, réf 31V6 LMPP (Titre II - Chapitre 1er - D)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201D02.6
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de cheville




Modèle :


Tour de cheville	Taille	Coloris	Référence
19-20 cm	1	noir	7236131
21-22 cm	2	noir	7236148
23-24 cm	3	noir	7236154
25-27 cm	4	noir	7236160

Conseils d'utilisations

Pose:

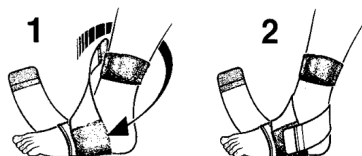

- 1- enfiler la chevillère, la partie haute étant constituée par la patte de fermeture circulaire
- 2- fermer cette patte à l'aide de l'auto-agrippant pour assurer une parfaite adaptation
- 3- tirer la première sangle, l'entourer autour de la cheville et la fixer sur le feutre situé à sa base (schémas 1 et 2)

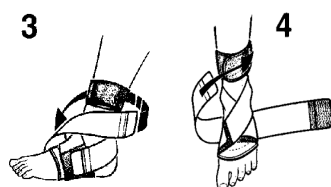

4- répéter la même opération avec la seconde sangle (schéma 3): la cheville doit être parfaitement maintenue latéralement tout en conservant la flexion-extension

5- si nécessaire, le maintien de la cheville peut être renforcé. Pour ce faire, étaler la sangle amovible sur le sol. Poser ensuite le pied sur sa partie médiane (schéma 4), et tirer ses deux extrémités vers le haut




6- opérer un croisement en 8 au-dessus du pied et fixer les extrémités de cette sangle sur le feutre de la partie supérieure de la cheillère (schéma 5)

Pour le confort du port, vérifier l'absence de plis éventuels sur les sangles.

Autres

■ Composition :
viscose 40% - élastodiène guipé 33% - polyester 20% - élasthane 7%

■ Entretien :

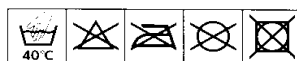

essorer par pression

sécher loin d'une source de chaleur

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219110650+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219110650+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-