

Caractéristiques

- Coques rigides en plastique (1)
- Inserts latéraux à gel permettant un traitement cryothérapique (2)
- Réglage précis par sangles auto-agrippantes (3)
- Oeillets pour passage des lacets assurant un meilleur serrage (4)
- Sangle calcanéenne réglable (5)



Indications

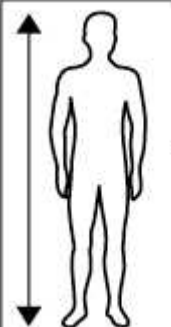
- Entorses graves
- Entorses moyennes
- Fractures malleolaires

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Orthèse stabilisatrice de cheville LMPP (Titre II - Chapitre 1er)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G00.18
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
Droit	0 EUR
Gauche	0 EUR

Tailles et modèles

	Taille Size	Taille Height
	0	< 160 cm
1	> 160 cm	

Modèle : Droit

Taille personne	Taille	Coloris	Référence
<160cm	0	blanc	7684355
> 160 cm	1	blanc	7506122

Conseils d'utilisations

Pose:

- 1- enfiler une chaussette et s'asseoir, le pied posé sur le sol. Placer la cheville dans la chevillère et s'assurer que le centrage est correct.
- 2- Accrocher la sangle inférieure en faisant le tour de la jambe. Bien la tirer en arrière et bien l'accrocher au velcro. Ajuster la petite sangle postérieure de maintien à l'aide des pattes auto-agrippantes.
- 3- Tirer la sangle calcanéenne située au niveau du talon et l'accrocher fermement des deux côtés avec le velcro.
- 4- Accrocher la sangle supérieure de la même manière que la sangle inférieure et

réajuster, si besoin, la sangle inférieure.

5- Si vous souhaitez porter une chaussure à lacets: mettre la chaussure et passer les lacets dans les oeillets. Faire le noeud normalement au-dessus de la languette de la chaussure.

La chevillère peut être retirée pour permettre la toilette. Ne la remettre qu'après avoir bien séché le pied.

Cryothérapie (utilisation des inserts réfrigérants):

L'insert souple contenant le gel réfrigérant peut se retirer. Bien repérer son emplacement initial afin de le remettre en place correctement (en particulier, les coins rigides de la coque plastique doivent être couverts).

1- Placer les inserts dans le congélateur ou le freezer pendant une durée d'environ une heure (le gel ne se solidifie pas).

2- Les replacer dans la chevillère pour utilisation.

Dans le cas d'un enfant, d'une personne à la peau sensible, diabétique ou avec une insuffisance vasculaire, il est impératif de demander l'avis d'un médecin avant de suivre le traitement par la cryothérapie et de ne pas placer les inserts réfrigérants directement en contact avec la peau (toujours porter une chaussette).

Autres

■ Composition :

Polyéthylène PVC - Polyamide

■ Entretien :



Essuyer avec un chiffon humide. Ne pas tremper dans l'eau. Ne pas utiliser de détergent ni eau de javel.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219110517+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219110517+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-