

## Caractéristiques

- Tissu élastique de forte contention
- Articulation polycentrique avec limitation de flexion et extension, réglable par pas de 20° (de 10° à 110°) (1)
- Montants latéraux métalliques renforcés avec patte centrale de maintien (2)
- Doubles sangles réglables (effet anti-garrot) (3)
- Enfilage ou mise en place facilitée par ouverture frontale (selon version)



## Indications

- Rupture des ligaments croisés (traitement fonctionnel)
- Rupture des ligaments croisés (après ligamentoplastie)
- Entorses graves des ligaments latéraux (traitement fonctionnel)
- Entorses moyennes des ligaments latéraux
- Laxités chroniques

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Orthèse de genou articulée LMPP (Titre II - Chapitre Ier - G)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G00.222
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

## Tailles et modèles

Tour de genou



Modèle :

Tour de genou	Taille	Coloris	Référence
31 - 33 cm	1	noir	7476131
34 - 36 cm	2	noir	7476148
37 - 39 cm	3	noir	7476154
40 - 42 cm	4	noir	7476160
43 - 45 cm	5	noir	7476177
46 - 48 cm	6	noir	7476183

## Conseils d'utilisations

### Contrôle de flexion/ extension

Au départ, la genouillère est réglée avec une limitation minimale (110° flexion, 0° extension). Une limitation de l'angle de flexion et/ou d'extension est possible par pas de 20°, de 10° à 110°. Pour cela :

- 1- défaire la patte auto-agrippante centrale de maintien
- 2- ouvrir le couvercle de l'articulation et enlever les quatre plots
- 3- régler les angles de flexion/extension en insérant ces quatre plots dans les loges

correspondant aux limitations souhaitées (réglage de l'angle d'extension en zone supérieure, réglage de l'angle de flexion en zone inférieure). Si vous ne souhaitez limiter qu'un seul angle, n'insérer que les deux plots correspondants

4- fermer le couvercle de l'articulation et refermer la patte auto-agrippante centrale de maintien.

NB1: le réglage doit être fait de manière symétrique pour les deux montants de chaque articulation, ainsi que pour les deux articulations de la genouillère

NB2: la genouillère est livrée avec deux plots supplémentaires de rechange

**Pose:**


Enfiler la genouillère. Fermer les pattes auto-agrippantes et les sangles inférieures et supérieures.

---

**Autres**

- Composition :  
viscose 60% - élasthane guipé 28% - polyester 12%

- Entretien :

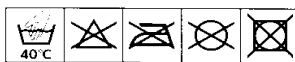

enlever les articulations pour le lavage.

genouillère: essorer par pression, sécher loin d'une source de chaleur



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219113243+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219113243+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-