

Caractéristiques

- Immobilisation du genou par 4 baleines
- Fermeture précise par sangles auto-agrippantes

Indications

- Entorses bénignes
- Entorses moyennes
- Repos articulaire
- Immobilisation pré ou post opératoire

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Attelle et orthèse de genou non-articulé LMPP (chapitre II - titre I)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G00.221
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
Standard	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de cuisse (20 cm au dessus du genou)



Modèle :

Hauteur	Taille unique	Référence
30 - 35 cm	Taille unique	4329323

Conseils d'utilisations

Conseils de mise en place :


- 1- Placer la genouillère sur le genou
- 2- Ajuster le positionnement de l'orthèse à l'aide de l'auto agrippant inférieur
- 3- Resserer l'auto agrippant supérieur sans exercer une pression trop forte sur la cuisse

La partie supérieure de l'attelle ne doit pas entraver la flexion de la cuisse.

Autres

- Composition :
 - 35% Polyuréthane
 - 20% Polyester
 - 20% Coton
 - 15% Polyamide

- Entretien :

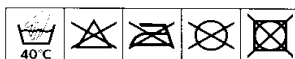

enlever les baleines pour le lavage
essorer par pression, sécher loin d'une source de chaleur

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219113120+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219113120+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-