

## Caractéristiques

- Orthèse statique de pouce/poignet s'adaptant parfaitement à la morphologie grâce à son composant formable.
- Forme du produit respectant l'anatomie et la mobilité phalangienne.
- Auto-agrippant facilitant la mise en place du produit.
- Complexe mousse optimisant le confort.



## Indications

- Entorses benignes
- Reprise du sport
- Rhizarthrose

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : attelle digitale pour flexion MP pouce en abduction - LPPR (titre II - chap.1 - orthèses)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201 G 01 1322
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
droit	0 EUR
gauche	0 EUR

## Tailles et modèles

Longueur du pouce



Modèle :

Longueur pouce	Taille	Référence
7 - 8.5 cm	1	7910828
9 - 10.5 cm	2	7910834
11 - 12.5 cm	3	7910840

## Conseils d'utilisations

Pose :

- 1- Ouvrir la sangle du poignet.
- 2- Enfiler le pouce dans l'orthèse placée sur le dos de la main au dessus du poignet : attention, le bas de l'orthèse ne doit pas bloquer l'articulation du poignet.
- 3- Ajuster la sangle auto-agrippante autour du pouce.
- 4- Former le produit sur la main.
- 5- Fermer le produit à l'aide de la sangle auto-agrippante.
- 6- Ne pas hésiter à resserrer la sangle du pouce.

## Autres

- Composition :  
Face intérieure : 92% coton - 8% elasthane

Face extérieure : 100% polyamide

- Entretien : 

Laver à la main et à l'eau savonneuse.

Essorer par pression.

Sécher à l'air libre loin d'une source de chaleur.



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219114542+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219114542+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-