

Caractéristiques

- FORM-IT 02 - Epaisseur : 3,2 mm - Non perforé - Blanc
- L'attelle permet le maintien du poignet et de la main à environ 30° d'extension du poignet.
- Le pouce est positionné en opposition et abduction palmaire.

Indications

- Tendinites
- Syndrome du tunnel carpien
- Entorses
- Réparation des tendons
- Laxités chroniques (traitement fonctionnel)
- Arthrites rhumatoïdes (traitement correcteur)
- Brûlures de la main

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Titre II, Chap.1 section G "Appareils divers de correction orthopédique"
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G01.1423
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
droit	0 EUR
gauche	0 EUR

Tailles et modèles

Modèle :

Largeur main	Taille	Référence
5 - 9 cm	1	7654992
9 - 10 cm	2	7656017
> 10 cm	3	7655046

Conseils d'utilisations

Utilisez de préférence un pistolet à air chaud. Régler le thermostat entre moyen et haut. Tenir à une distance d'environ 10 à 15 cm de la zone.

- 1 - Pour déterminer la taille, mesurer la largeur de la 2ème à la 5ème MCP. Sélectionner le modèle : gauche ou droit.
- 2 - Indiquer les zones à remodeler ou ajuster à l'aide d'un crayon gras ou stylo.
- 3 - Enlever l'attelle du membre. Travailler les retouches zone par zone. Ne jamais travailler plusieurs zones à la fois. Chauffer pendant environ 30 secondes avec un mouvement constant de gauche à droite.
- 4 - Vérifier toujours la température de la zone chauffée avant de poser l'attelle sur le patient. Poser l'attelle sur le membre et remodeler / ajuster la zone en question. Répéter les étapes 3 et 4 pour chaque zone.
- 5 - Pour la finition, couper les bords lorsque le matériau est encore chaud. Utiliser vos doigts pour arrondir et replier les bords vers l'extérieur de l'attelle. Appliquer les sangles.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219104025+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219104025+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-