

Caractéristiques

- Matériau : FORM-IT 02
- Epaisseur : 3,2 mm
- Non perforé
- Coloris : blanc
- L'attelle sphérique maintient la voûte palmaire, la main et le poignet dans une position inhibitrice des réflexes.

Indications


- Pathologies neurologiques (traitement correcteur et/ou préventif de déformations dues à des spasmes ou contractures)
- Hémiplégies

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Titre II, Chap.1 section G
"Appareils divers de correction orthopédique"
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G01.1423
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
droit	0 EUR
gauche	0 EUR

Tailles et modèles

Modèle : 

Largeur main	Taille	Référence
5 - 9 cm	1	7655069
9 - 10 cm	2	7655081
> 10 cm	3	7655106

Conseils d'utilisations

Utilisez de préférence un pistolet à air chaud. Régler le thermostat entre moyen et haut. Tenir à une distance d'environ 10 à 15 cm de la zone.

1 - Pour déterminer la taille, mesurer la largeur de la 2ème à la 5ème MCP. Sélectionner le modèle : gauche ou droit.

2 - Indiquer les zones à remodeler ou ajuster à l'aide d'un crayon gras ou stylo.

3 - Enlever l'attelle du membre. Travailler les retouches zone par zone. Ne jamais travailler plusieurs zones à la fois. Chauffer pendant environ 30 secondes avec un mouvement constant de gauche à droite.

4 - Vérifier toujours la température de la zone chauffée avant de poser l'attelle sur le patient. Poser l'attelle sur le membre et remodeler / ajuster la zone en question. Répéter les étapes 3 et 4 pour chaque zone.

5 - Pour la finition, couper les bords lorsque le matériau est encore chaud. Utiliser vos doigts pour arrondir et replier les bords vers l'extérieur de l'attelle. Appliquer les sangles.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219104059+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219104059+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-