

### Caractéristiques

- Matériau : FORM-IT 02
- Epaisseur : 3,2 mm
- Non perforé
- Coloris : blanc
- L'attelle de repos est idéale pour positionner les mains atteintes d'arthrites ou de contractures légères

### Indications

- Tendinites
- Syndrome du tunnel carpien
- Entorses
- Réparation des tendons
- Laxités chroniques (traitement fonctionnel)
- Arthrites rhumatoïdes (traitement correcteur)
- Brûlures de la main

### Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Titre II, Chap.1 section G "Appareils divers de correction orthopédique"
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G01.1423
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
droit	0 EUR
gauche	0 EUR

### Tailles et modèles

Modèle :

Largeur main	Taille	Référence
5 - 9 cm	1	7655187
9 - 10 cm	2	7655201
> 10 cm	3	7655224

### Conseils d'utilisations

Utilisez de préférence un pistolet à air chaud. Régler le thermostat entre moyen et haut. Tenir à une distance d'environ 10 à 15 cm de la zone.

1 - Pour déterminer la taille, mesurer la largeur de la 2ème à la 5ème MCP. Sélectionner le modèle : gauche ou droit.

2 - Indiquer les zones à remodeler ou ajuster à l'aide d'un crayon gras ou stylo.

3 - Enlever l'attelle du membre. Travailler les retouches zone par zone. Ne jamais travailler plusieurs zones à la fois. Chauffer pendant environ 30 secondes avec un mouvement constant de gauche à droite.

4 - Vérifier toujours la température de la zone chauffée avant de poser l'attelle sur le patient. Poser l'attelle sur le membre et remodeler / ajuster la zone en question. Répéter les étapes 3 et 4 pour chaque zone.

5 - Pour la finition, couper les bords lorsque le matériau est encore chaud. Utiliser vos doigts pour arrondir et replier les bords vers l'extérieur de l'attelle. Appliquer les sangles.



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219103500+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219103500+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-