

Caractéristiques

- Matériau : FORM-IT 04
- Epaisseur : 3,2 mm
- Perforé : 1 %
- Coloris : beige clair
- L'orthèse poignet - pouce permet une parfaite immobilisation du poignet et du pouce (articulations TMC et MCP)
- Caractéristiques et avantages :
 - - moulage facile et rapide résultant en un gain de temps de plus de 30%.
 - - facilité d'application grâce à l'offre étudiée en forme, matière, épaisseur et finition.
 - - économique grâce à un taux de rebuts matière minime.
 - - offre large de modèles et de tailles pour une adaptation sur mesure parfaite.
 - - appareillage simple nécessitant qu'un équipement de petite taille.
 - - conditionner par 3. Formes réversibles pour une application main droite ou main gauche.

Indications

- Tendinites
- Arthrites
- Arthroses
- Entorses du poignet et/ou pouce
- Ténosynovite (maladie de De Quervain)
- Fracture du scaphoïde

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Titre II, chap. 1 section G
" Appareils divers de correction orthopédique"
- Référence(s) Sécurité Sociale : Ref. 201G01.1523
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

Tailles et modèles

Modèle : standard

Largeur main	Taille	Référence
7.5 - 9 cm	1	7654880
9 - 11.5 cm	2	7654897
> 11.5 cm	3	7654905

Conseils d'utilisations

Utilisez de préférence un bac électrique de taille appropriée avec thermostat. Chauffer l'eau en respectant une température entre 62°C et 72°C. Contrôler l'exactitude de la température à l'aide d'un thermomètre. Ou utiliser un pistolet à air chaud. Régler le thermostat entre Moyen et Haut. Tenir à une distance d'environ 10 à 15 cm du matériau.

- 1 - Pour déterminer la taille, mesurer la largeur de la 2^e à la 5^e MCP. Inverser la forme prédécoupée pour obtenir un modèle gauche ou droit.
- 2 - Immerger la forme pendant 30 à 60 secondes.
- 3 - Enlever la forme prédécoupée de l'eau et la poser sur une serviette. Tamponner

délicatement avec une autre serviette pour rapidement sécher la surface. Eviter d'appuyer trop fort.

4 - Vérifier toujours la température du matériau avant d'appareiller le patient. Si le patient est sensible à la chaleur, poser d'abord un tissu ou un tricot très fin sur le membre à appareiller.

5 - Placer le matériau sur le membre. Mouler l'attelle ou l'orthèse selon les visuels figurant dans la notice. Le temps avant durcissement est d'environ 3 à 5 minutes.

6 - Pour la finition, couper les bords lorsque le matériau est encore chaud. Utiliser vos doigts pour arrondir et replier les bords vers l'extérieur de l'attelle. Appliquer les sangles.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219114756+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219114756+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-