

Caractéristiques

- La gamme thérapeutique de référence.
- Contention classe 1: 10-15mmHg

Indications

- Oedeme vespéral
- Varicosites
- Telangiectasies
- Varices simples
- Insuffisance veineuse de la grossesse
- Prévention TVP

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Orthèses élastiques de contention des membres LMPP titre II - chapitre 1er - D
- Référence(s) Sécurité Sociale : 22 V 1 x2, 22 V 4x2, 22 V 4x2 + SV4
- TVA 5.5 %


Modèle	Tarif resp. TTC
Bas-cuisse homme avec anti-glisse	0 EUR
Chaussettes homme	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de cheville



Hauteur chaussettes

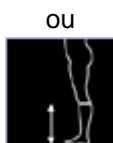

ou

Hauteur bas-cuisse



ou

Hauteur collant

Modèle : Bas-cuisse homme avec anti-glisse

Tour de cheville	Tour de cuisse	Taille	Hauteur en cm	Hauteur	Coloris	Référence
19-21 cm	44 - 52 cm	1	< 65 cm	N	beige	7870945
19-21 cm	44 - 52 cm	1	< 65 cm	N	noir	7871028
19-21 cm	44 - 52 cm	1	> 65 cm	L	beige	7870980
19-21 cm	44 - 52 cm	1	> 65 cm	L	noir	7871063
21-24 cm	49 - 57 cm	2	< 65 cm	N	beige	7870951
21-24 cm	49 - 57 cm	2	< 65 cm	N	noir	7871034
21-24 cm	49 - 57 cm	2	> 65 cm	L	beige	7870997
21-24 cm	49 - 57 cm	2	> 65 cm	L	noir	7871086
24-26 cm	54 - 62 cm	3	< 65 cm	N	beige	7870968
24-26 cm	54 - 62 cm	3	< 65 cm	N	noir	7871040
24-26 cm	54 - 62 cm	3	> 65 cm	L	beige	7871005
24-26 cm	54 - 62 cm	3	> 65 cm	L	noir	7871092
26-29 cm	56 - 64 cm	4	< 65 cm	N	beige	7870974
26-29 cm	56 - 64 cm	4	< 65 cm	N	noir	7871057
26-29 cm	56 - 64 cm	4	> 65 cm	L	beige	7871011

26-29 cm	56 - 64 cm	4	> 65 cm	L	noir	7871100
----------	------------	---	---------	---	------	---------

Conseils d'utilisations

Instructions d'enfilage:


Mettez vos chaussettes, bas ou collants de préférence le matin, dès le lever, car vos jambes ne sont pas enflées. Évitez le contact direct de vos chaussettes, bas ou collants avec des crèmes ou des pommades.

- 1- il est conseillé de porter des gants en caoutchouc pour faciliter l'enfilage de vos chaussettes, bas ou collant de contention.
- 2- rouler la chaussette, le bas ou le collant sur lui-même jusqu'au bout du pied. Enfiler puis vérifier que le talon soit bien en place
- 3- avec les deux mains, étirer en largeur la chaussette, le bas ou le collant pour le passage de la cheville et dérouler avec précaution sur la jambe. Éviter de tirer sur le tissu plus qu'il n'est nécessaire
- 4- au niveau du genou, ajuster parfaitement le bas ou collant afin qu'il ne reste aucun pli le long de la jambe

Autres

- Composition :
polyamide 70% - élasthane guipé 30%

- Entretien :

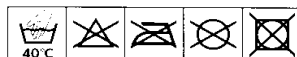

1. Lavez quotidiennement avec une lessive pour linge délicat et sans assouplissant
2. Rincez abondamment à l'eau tiède
3. Essorez sans tordre et n'utilisez ni sèche-linge ni source de chaleur directe (radiateur, soleil...) pour le séchage
4. Ne pas repasser

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219104831+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219104831+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-