

11@9@5xe">9@11@9@5xe">9@11@9@5xe">11@9@11@9@5xe">9@11@9@5xe">11@9@11@9@5xe">11@9@11@9@5xe">4@11@9@11@9@5xe">9@11@9@5xe'
filled="f" stroked="f">

- UNE LIBERTE TOTALE DANS L'EXPRESSION DE VOS BESOINS
- LE REGROUPEMENT DE TOUTES VOS TELECOMMANDES EN UNE SEULE
- LA SOUPLESSE DANS LA GESTION DE VOS COMMANDES INFRAROUGES
- LA TOTALE AUTONOMIE DANS LA CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE
- UNE COMMUNICATION VISUELLE ET SONORE AVEC VOUS
- UNE PRISE EN COMPTE PRECISE DE VOS HABITUDES DE VIE
- UNE COMMANDE UNIQUE PAR TOUCHE, CAPTEUR DE SOUFFLE OU CONTACTS
- UN FONCTIONNEMENT MANUEL OU ENTIEREMENT AUTOMATIQUE
- UN APPEL D'URGENCE PRIORITAIRE
- DES FONCTIONS ANNEXES EVOLUEES (Macros, commandes extérieures)
- UNE FABRICATION ROBUSTE ET UN FONCTIONNEMENT SECURISE
- UNE GRANDE ADAPTABILITE AU TYPE DE HANDICAP

Le nouveau concept d' INTERPRETE repose sur l'utilisation d'un logiciel spécifique, qui créer une base de données des équipements infrarouges à commander. Ces commande L'avantage majeur de ce concept est qu'il ne nécessite aucune intervention du fabricant pour configurer ou reconfigurer un environnement. Un simple ordinateur suffit.

UNE COMMUNICATION VISUELLE ET SONORE AVEC VOUS

Le "menu" des commandes créé par le logiciel de configuration, téléchargé vers la télécommande, est lisible sur l'afficheur sous forme de liste déroulante par inversion vidéo.

UNE PRISE EN COMPTE PRECISE DE VOS HABITUDES DE VIE

Toutes les commandes que vous sollicitez sont stockées au fil de l' eau dans la mémoire d' INTERPRETE sous forme de statistiques, et après chargement dans le logiciel de cc

UNE COMMANDE UNIQUE PAR TOUCHE, CAPTEUR DE SOUFFLE OU CONTACTS

UN FONCTIONNEMENT MANUEL OU ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

L'utilisation de la télécommande se résume à une simple pression sur une touche tactile ou un souffle (ou aspiration selon le paramétrage) dans un tuyau en mode automatique

UN APPEL D'URGENCE PRIORITAIRE

Un appel d'urgence prédefini lors de la configuration, est accessible de façon prioritaire sur toutes les commandes par un appui sur une touche tactile dédiée, ou par aspiratio

DES FONCTIONS ANNEXES EVOLUEES

En plus de ses fonctions originelles, la télécommande est pourvue d'un dispositif de détection de verticalité, qui génère un appel d'urgence en cas de chute de fauteuil roulant

UNE FABRICATION ROBUSTE ET UN FONCTIONNEMENT SECURISE

La télécommande est conçue pour des conditions d' utilisation rudes, et pour présenter une sécurité de fonctionnement absolue par le contrôle permanent de ses fonctions. U

UNE GRANDE ADAPTABILITE AU TYPE DE HANDICAP

Une gamme d'accessoires de commande adaptés au handicap de l'utilisateur est connectable à la télécommande, afin de satisfaire au mieux le confort de l'utilisateur.

ADEP Atelier Noël le Gaud 7 rue Voltaire 92800 Puteaux 01 46 97 16 87 **contact@apanl.com**