

Urinal masculin Care Bag URI



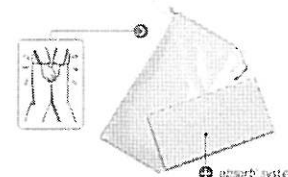
Code article ACL : **7733993**

Présentation


Sac contenant un tampon super-absorbant permettant de gélifier tous les liquides et de bloquer la prolifération des odeurs.

Mode d'emploi

1. Ouvrir le pack et en extraire le rouleau de sacs
2. Dérouler le 1er sac et le détacher selon la prédécoupe
3. Ouvrir le sac, et contrôler la présence du tampon absorbant au fond du sac
4. Tenir le sac avec les mains
5. Faire les besoins dans le sac
6. Attendre la gélification des liquides (+/- 500 ml maximum en quelques secondes)
7. Fermer le sac, nouer et jeter à l'endroit approprié.



Précautions d'emploi

 Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi.
Ne pas laisser le sac à la portée des enfants.

Composition

Sac en polyéthylène muni de liens. Tampon super-absorbant (SAP) composé d'un support non-tissé à base de sulfate couplé à des copolymères à base d'acrylate de sodium.

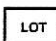

Efficacité

Absorption de 500 ml de liquide organique ou plusieurs litres d'eau déminéralisée

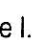
Bénéfices

- Recommandé en collectivité, chez les urgentistes (Samu, pompiers, services d'urgence, ambulances), pour toute personne en manque d'autonomie.
- Remplace l'urinal plastique ou « pistolet ».
- Hygiène accrue, produit à usage unique, gain de temps, blocage des odeurs, élimination simple et sans risque

Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot  et une date de péremption  (5 ans).

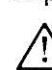
Conformité

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux  Classe I.
Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.



Dangers/sécurité

Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne.

 Risques très légers d'irritation oculaire ou des voies respiratoires en cas de contact prolongé avec le tampon absorbant.

A conserver avant utilisation dans son emballage fermé éloigné de toute source d'humidité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Code douanier

5603149090

Conditionnement

Unité	Pack avec fermeture à Zip de 20 sacs	Sac : 15 x 35 cm / Tampon : 13 x 24 cm
Carton	25 packs de 20 sacs (soit 500 sacs)	60 (L) x 40 (l) x 20 (h) cm / 10,5 Kg
Palette	32 cartons (8 couches de 4 cartons) - soit 800 packs / 20000 sacs	80 (L) x 120 (l) x 160 (h) cm / 336 Kg (palette non comprise)

Elimination

Déchets ménagers pour l'élimination traditionnelle. Dans le cas d'un patient contaminé, l'élimination se fera en déchets à risque (DASRI).