

Orthèse statique de poignet

Thämert Orthoflex zip


Orthèse statique de poignet ambidextre avec fermeture éclair

L'orthèse « Thämert Orthoflex zip » se compose d'un tissu élastique de confort. Le corps de l'orthèse anatomique possède sur le côté du petit doigt une fermeture éclair séparable qui lui procure une optique moderne. Pour mettre en place l'orthèse, il faut engager la fermeture éclair et la fermer sur 2 cm environ. Après avoir enfilé l'orthèse, il est alors possible de fermer la fermeture éclair facilement et sans effort. Bloquer enfin la tîrette.


L'attelle en aluminium anatomique et malléable permet une adaptation aux besoins thérapeutique du patient et garantit l'immobilisation recherchée du poignet suivant l'indication médicale. Pour convertir la version droite en version gauche, il suffit de changer l'emplacement de l'attelle.

Une bande circulaire auto-agrippante d'une largeur de 5 cm assure un maintien complémentaire. Elle peut être retirée ultérieurement au cours du traitement en accord avec le médecin ou le thérapeute.

L'orthèse statique de poignet « Thämert Orthoflex zip », dotée d'une découpe fonctionnelle et d'un nouveau design, satisfait pleinement aux critères orthopédiques techniques et est synonyme de grande satisfaction des patients.

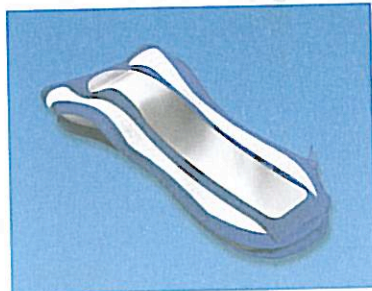

Thämert Orthoflex zip avec attelle palmaire sortie du fourreau de protection.

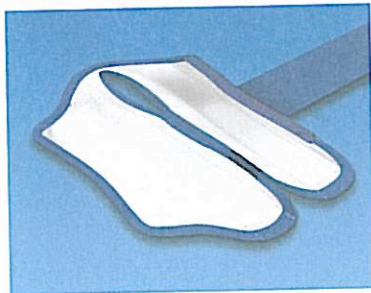

Thämert Orthoflex zip avec fermeture éclair ouverte

INDICATIONS

- Post-traumatique et post-opératoire
- Ténosynovite
- Arthrose et arthrite du poignet
- Entorses sévères
- Paralysie radiale
- Syndrome du canal carpien
- Nécrose aseptique du semi-lunaire

TABLEAU DES TAILLES

Tailles	Tour de poignet en cm
XS	13,5 - 15,0
S	15,0 - 16,5
M	16,5 - 18,0
L	18,0 - 19,5
XL	19,5 - 21,0

Coloris: blanc-bleu
Côtés gauche et droit identiques

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage à 30° avec une lessive douce, après avoir fermé les bandes auto-agrippantes.

Prudence, ne pas essorer

En France:

Thämert-France S.A.R.L.
6, rue du Centenaire, 93182 Montreuil Cédex
Tél.: 01 42 87 11 12, Fax: 01 42 87 32 09
Email: thaemert.service-clients@wanadoo.fr
www.thaemert.com

En Belgique:

Axamed nv-sa
Industriepark West 58, B - 9100 St Niklaas
Tel. 03 778 04 48, Fax 03 778 05 38
www.axamed.be, info@axamed.be

THÄMERT

D - 30938 Großburgwedel/Germany