

Thämert Orthoflex stabil

Orthèse statique poignet-main avec attelles dorsale et palmaire

«Thämert Orthoflex stabil» se compose d'un tricot d'écartement respirant. Une poche destinée à recevoir une attelle de maintien dont la forme est adaptée à l'anatomie de la main et du poignet, se trouve respectivement du côté palmaire et du côté dorsal sur la face externe. Les attelles sont en alliage d'aluminium et peuvent être adaptées au sujet. L'attelle palmaire va de l'avant-bras jusqu'à la paume de la main.



Thämert Orthoflex stabil avec attelle palmaire sortie du fourreau de protection

Du côté dorsal, l'attelle va de l'avant-bras jusqu'au dos de la main. L'attelle dorsale comporte un renforcement en croissant pour protéger l'apophyse styloïde de l'ulna. Un capitonnage incorporé dans la poche recevant l'attelle, permet d'éviter qu'une compression s'exerce sur le dos de la main. Une bande élastique auto-agrippante de 5 cm de largeur assure un maintien supplémentaire.



Thämert Orthoflex stabil avec attelle de maintien dorsale sortie du fourreau de protection.

INDICATIONS

- Post-traumatique et post-opératoire
- Arthrose du poignet
- Luxations
- Entorses
- Arthrite
- Main ballante (paralysie radiale)
- Syndrome du canal carpien (compression du nerf médian)
- Ténosynovite (inflammation de la gaine d'un tendon)

TABLEAU DES TAILLES

Tailles	Tour de poignet en cm
XS	11,5 - 14,0
S	14,0 - 16,5
M	16,5 - 18,5
L	18,5 - 20,5
XL	> 20,5

Coloris: blanc-bleu, chair
Côtés gauche et droit différents

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage à 30° avec une lessive douce, après avoir fermé les bandes auto-agrippantes.



Prudence, ne pas essorer

En France:

Thämert-France S.A.R.L.
6, rue du Centenaire, 93182 Montreuil Cédex
Tél.: 01 42 87 11 12, Fax: 01 42 87 32 09
Email: thaemert.service-clients@wanadoo.fr
www.thaemert.com

En Belgique:

Axamed nv-sa
Industriepark West 58, B - 9100 St Niklaas
Tel. 03 778 04 48, Fax 03 778 05 38
www.axamed.be, info@axamed.be

THÄMERT