




Siège de Transfert "Carony"

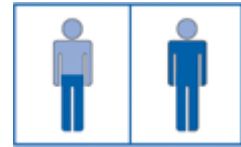

Mobilité
réduite

Descriptif

⇒ A l'aide d'un siège confortable, **le transfert d'une personne à mobilité réduite peut être réalisé de l'intérieur d'un véhicule** deux portes ou quatre portes vers l'extérieur sur une embase roulante qui devient ainsi un vrai fauteuil roulant.

⇒ Existe en version fauteuil motorisé électrique avec moteurs intégrés dans les moyeux de roues de type E-FIXE de Mobitech.

⇒ **Le transfert s'effectue sans jamais quitter le siège**, évitant ainsi de nombreuses manipulations et assurant un grand confort à la personne transférée..

Fonctionnement

Description du transfert vers l'extérieur :

- ⇒ **Le siège du véhicule pivote**
- ⇒ Une tierce personne présente l'embase montée sur roues devant le siège et accroche sans effort l'embase avec la possibilité de régler la hauteur des glissières.
- ⇒ En agissant sur la manette de transfert, le siège glisse sans effort sur l'embase et vient se bloquer en bonne position à l'extérieur du véhicule sur l'embase roulante.
- ⇒ Le transfert est réalisé.

Description du transfert vers l'intérieur :

- ⇒ Après avoir ouvert la porte du véhicule, et fait pivoter le plateau tournant, il suffit de présenter le fauteuil roulant en position arrière jusqu'à pouvoir cliquer sur le plateau tournant avec la possibilité de régler la hauteur des glissières
- ⇒ Le siège est libéré de son embase lorsque l'on actionne la manette de transfert
- ⇒ Il glisse à l'intérieur sans effort et vient se bloquer sur le plateau tournant
- ⇒ Le siège pivote ensuite et vient se placer en position passager
- ⇒ **Attachez la ceinture, vous pouvez partir.**

