

SANGLE CLAVICULAIRE

INDICATION

Appareil utilisé pour le maintien des fractures de la clavicule et les entorses acromioclaviculaires.

DESCRIPTION

Cette sangle présente 2 originalités qui en font un produit de qualité :

- Elle est matelassée et spécialement rembourrée sur une large surface pour éviter les phénomènes de compression et d'irritation du creux axillaire.
- 2 systèmes d'attaches, l'un à l'avant du thorax, l'autre à l'arrière, permettent un serrage minutieux et indéréglable.

Référence	Taille
SC 1	enfant de 4 à 8 ans
SC 2	enfant de 9 à 12 ans
SC 3	adolescent
SC 4	adulte moyen
SC 5	adulte fort

MODE D'UTILISATION

Le médecin prépare le blessé en lui positionnant les épaules bien en arrière. Il place la sangle de façon à ce que la petite bande verticale tombe le long de la colonne vertébrale, puis croise la sangle dans le dos en passant par dessus la petite bande verticale et revient fermer à l'avant en passant dans la boucle.

Enfin, il demande au patient d'inspirer au moment de la fermeture de l'auto-agrippant pour d'éviter tout phénomène d'oppression thoracique.

Pour terminer, il relève la bande verticale qui longe la colonne vertébrale, en cravatant la sangle et fixe cette dernière grâce à l'auto-agrippant, selon le serrage désiré.



Photo n°2

Recommandations importantes

- afin d'assurer un maximum de sécurité et d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient à immobiliser,
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient.
- ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.
- ces produits doivent être mis en place par un personnel qualifié.

Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, leurs spécifications.