

## Caractéristiques

- La mousse à mémoire de forme revient doucement contrairement à une mousse traditionnelle qui revient rapidement. Elle exerce donc une faible contre-pression en regard de protubérances osseuses.
  - D'une épaisseur de 5,7 cm le coussin est protégé par une housse en jersey polyuréthane étanche au liquide mais perméable à la vapeur d'air.
  - Principes de fonctionnement :
    - Avec la mousse à faible mémoire de formes combiné avec un galbe anatomique :
      - -le corps s'enfonce dans la mousse et la pression du corps se trouve donc répartie sur une surface en contact avec la mousse plus importante,
      - -la mousse exerce une faible contre-pression en regard des ischions.
    - Limiter la macération : la housse est imperméable aux liquides mais perméable à la vapeur d'eau. Elle permet donc à la peau de respirer.
    - Réduire le cisaillement : la housse imperméable est très élastique. La base antidérapante évite en outre que le coussin ne glisse vers l'avant du fauteuil.
  - Avantages :
    - -Entretien.
    - -Légèreté.
    - -Confort.
    - -Stabilité.
  - Conclusion : Idéal pour des utilisateurs à risque moyen élevé. Léger, il convient aux utilisateurs actifs.
  - Caractéristiques techniques :
    - Garantie : trois ans (contre l'affaissement).
    - Poids maximum utilisateur : 90 Kg.
    - Poids du coussin : 1,1 Kg.
    - Dimensions : 43 x 42 x H 7,5 cm.
    - Housse imperméable lavable à 60°C et désinfectable par tout agent courant (par exemple Surfanios).
  - La prescription :
    - Coussin THUASNE en mousse viscoélastique dit "à mémoire de forme" (spécifier si patient ayant un risque d'escarre évalué à un score inférieur ou égal à 14 sur l'échelle de Norton et avec un antécédent d'escarre ou assis au fauteuil plus de 10 heures par jour).
- 

## Indications

- 
- 

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Non remboursé
- TVA %



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219111725+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219111725+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-