

Caractéristiques

- Deux coques moulées de forme anatomique, en mousse Plastazote® hypoallergique : une coque antérieure avec appui mentonnier et sternal, et une coque postérieure avec appui occipital et dorsal haut.
- Ouverture antérieure trachéale.
- Perforations sur la coque postérieure permettant d'évacuer la chaleur
- Fermeture facile par auto-agrippant.
- Radio-transparent.



Indications

- Entorses graves
- Neuralgies cervico-brachiales
- Arthrose cervicale

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Collier cervical rigide pour soutien fort, réf. C4 - LMPP (Titre II - Chapitre 1er - F)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201F03
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
écru	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de cou



Modèle : écru

Tour de cou	Taille	Référence
25.5 - 33 cm	1	7930541
33.5 - 40 cm	2	7930558
40.5 - 48 cm	3	7930564

Conseils d'utilisations


Pose:

La pose de cette orthèse nécessite l'aide d'une autre personne.

- Appliquer la partie arrière du collier sur le cou.
- Appliquer la partie avant du collier avec le menton posé sur l'appui prévu à cet effet, la partie avant chevauchant la partie arrière
- Centrer le collier pour avoir un alignement neutre et fixer l'ensemble avec l'auto-agrippant.

Autres

- Composition :
mousse 100% plastazote - renfort en plastique
- Entretien :

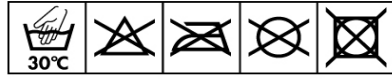

Laver à la main et à l'eau savonneuse, sans détergent ni eau de javel
Laisser sécher loin d'une source de chaleur

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219114503+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219114503+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-