

Caractéristiques

- Deux coques en plastique rigide pour assurer une bonne immobilisation
- Rebords plus souples pour un confort optimum
- Inserts en nid d'abeille pour une bonne adaptation morphologique
- Canaux de ventilation
- Attaches pivotantes pour préserver la Dorsi flexion

Indications

- Entorses moyennes
- Entorses bénignes

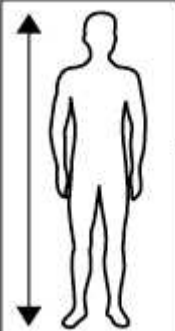
Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : "Orthèse stabilisatrice de cheville" L.P.P.R. (Titre II - Chapitre 1er - G) réf. 31V6 + SV11" L.P.P.R."
- Référence(s) Sécurité Sociale : Réf. S.S. 201G00.18
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
droit	0 EUR
gauche	0 EUR

Tailles et modèles

Entorses graves; Entorses moyennes;
Fractures malleolaires

	Taille Size	Taille Height
	0	< 160 cm
1	> 160 cm	

Modèle : droit

< 160 cm	0	blanc	7986659
> 160 cm	1	blanc	7986636

Conseils d'utilisations

Pose:

1 - Enfiler une chaussette et s'asseoir, le pied posé sur le sol, talon sur la sangle calcanéenne. Placer la cheville, partie "medial" à l'intérieur et partie "lateral" à l'extérieur. S'assurer que le centrage est correct.

2 - Faire le tour de la jambe avec la sangle inférieure. Bien la tirer en arrière et l'accrocher au velcro. Ajuster la petite sangle postérieure de maintien à l'aide des auto-agrippants.

3 - Ajuster la largeur de la sangle calcanéenne si nécessaire.

4 - Accrocher la sangle supérieure de la même manière que la sangle inférieure et réajuster, si besoin, la sangle inférieure.

5 - Enfiler délicatement le pied dans votre chaussure.

Autres

■ Composition :
voir étiquette produit

■ Entretien : 

- Laver uniquement à l'eau savonneuse, sans détergent ni eau de javel.

- Essorer par pression.

- Sécher loin d'une source de chaleur.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219113722+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219113722+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-