


Coussin KINERIS avec housses intégrales en PROMUST PU


Coussin composé de cellules pneumatiques réglables et individuellement déformables.
Livré avec housses intégrales Promust PU HD et une poire de gonflage.



Nombreuses tailles disponibles.

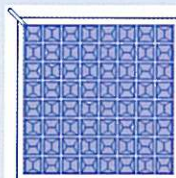

Mono-compartiment pour utilisateur sans trouble de la stabilité

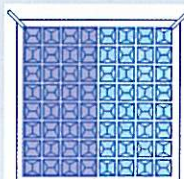

Bi-compartiments pour utilisateur avec trouble de la stabilité

Pour des utilisateurs à risque d'escarre :



LES + ASKLÉ

+ EFFICACITÉ

- Tailles du coussin et volume d'air adaptables précisément à la morphologie d'utilisateur pesant jusqu'à 150 Kg.
- Réduction des pressions d'interface par augmentation des surfaces d'appui par immersion dans un fluide.
- Limitation des forces de cisaillement (accompagnement des masses fessières) par la mobilité des cellules.

+ SÉCURITÉ

- Cellules en néoprène anallergique.
- Conforme aux réglementations feu.

+ ERGONOMIE

- Poignée de portage et de retrait du fauteuil.

+ CONFORT

- Thermorégulation par la perméabilité à la vapeur d'eau de la protection et la circulation d'air entre les cellules.

+ HYGIÈNE

- Protection compatible avec les produits détergents - désinfectants d'usage hospitalier.

+ FACILITÉ DE RÉGLAGE

- Livré avec une aide visuelle pour faciliter le réglage du coussin.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'air circule très lentement entre les cellules pour assurer une répartition homogène des pressions.

INDICATIONS

Prévention :

- Risque d'escarre élevé pour utilisateur sans trouble de la stabilité (monocompartiment) ou avec trouble de la stabilité (bicompartiment). (Évalué selon échelle validée et jugement clinique)
- Patient ayant un antécédent d'escarre ischiatique ou sacro - coccygienne, une paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, des troubles de la sensibilité des membres inférieurs.

Escarres constituées : sur avis médical.

CONSEIL ASKLÉ :

- Dans le cas d'un usage actif au fauteuil roulant, il sera préféré un coussin de 7 cm.
- Peut être utilisé sous la douche.

LA PRESCRIPTION

Se référer au guide de la prescription p 5-6-7.

Répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 72 Kg



coussin en gel de polyuréthane

coussin en mousse HR - épaisseur 6 cm

coussin KINERIS mono compartiment

Largeur d'assise cm	Largeur coussin cm	Profondeur coussin cm	Hauteur cm
32 à 35 cm	32	32	7 ou 10
32 à 35 cm	32	36	7 ou 10
35 à 39 cm	36	36	7 ou 10
35 à 39 cm	36	40	7 ou 10
40 à 43 cm	40	40	7 ou 10
40 à 43 cm	40	44	7 ou 10
44 à 47 cm	44	44	7 ou 10
44 à 47 cm	44	48	7 ou 10
48 à 51 cm	48	48	7 ou 10

CARACTÉRISTIQUES

Poids maximum validé: 150 kg

Cellules en Néoprène lavable

Garantie : 3 ans

Protection Promust PU HD : Jersey enduit de polyuréthane

Garantie (usage patient unique) : 3 ans

Garantie (usage multi patient) : 1 an