

# Coussin galbé ALOVA - option butée pelvienne

Coussin moulé en matière viscoélastique ALOVA. Sans butée pelvienne : livré avec deux housses intégrales Promust PU HD. Avec butée pelvienne : livré avec une butée pelvienne amovible logée dans une housse intégrale Promust PU HD prévue à cet effet et une protection intégrale pour un emploi du coussin sans butée



5 largeurs de 38 à 50,5 cm



Coussin ALOVA avec butée pelvienne pour utilisateur avec troubles de la stabilité

Pour des utilisateurs à risque d'escarre :



## LES + ASKLÉ

### + EFFICACITÉ

- Réduction des pressions d'appui par immersion dans la matière ALOVA.
- Réduction du « glissé avant ».
- Multi taille.
- Hauteur du coussin adaptée pour la propulsion d'un fauteuil roulant et pour les transferts.
- Portances adaptées au poids de la personne.

### + SÉCURITÉ

- Coussin avec butée pelvienne : la butée est stable et inamovible.
- Conforme aux réglementations feu.

### + ERGONOMIE

- Galbes ischiatiques positionnés sur la face supéro postérieure et rotateur externe à l'avant.
- Poignée de portage et de retrait du coussin.
- Coussin avec butée pelvienne : la forme de la butée facilite la mise au fauteuil et le lever.

### + CONFORT

- Thermorégulation par perméabilité à la vapeur d'eau de la protection.

### + HYGIÈNE

- Protection compatible avec les produits détergents - désinfectants d'usage hospitalier.
- Existe aussi avec une protection intégrale sans couture DUAL MEMBRANE en largeur 43 cm.

#### CARACTERISTIQUES

Support : Mousse moulée viscoélastique ALOVA

Garantie : 3 ans

Protection intégrale Promust PU HD : Jersey enduit de polyuréthane

Garantie (usage patient unique) : 3 ans

Garantie (usage multi patient) : 1 an

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La matière viscoélastique ALOVA diminue les pressions en augmentant les surfaces de contact grâce à une meilleure immersion.

## INDICATIONS

**Prévention** : risque d'escarre moyen à élevé. (Évalué selon échelle validée et jugement clinique).

Utilisateur sans trouble de la stabilité : coussin galbé seul

Utilisateur avec trouble de la stabilité : coussin galbé avec sa butée pelvienne


## CONSEIL ASKLE

- Pour des utilisateurs présentant des troubles de la stabilité sagittale ("glissé avant"), utiliser un coussin avec butée pelvienne et/ou un fauteuil à assise inclinable de type CYLTHIA.
- Dans le cas de l'utilisation du coussin avec butée pelvienne chez une personne de forte corpulence, veiller au risque d'appui génital.


## LA PRESCRIPTION

Se référer au guide de la prescription p 5-6-7.

### Répartition de pressions chez un patient de 172 cm et 75 kg

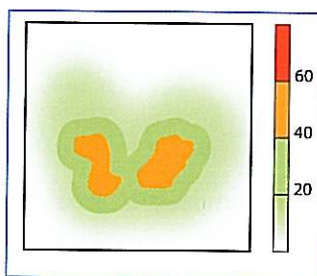

coussin en gel de polyuréthane

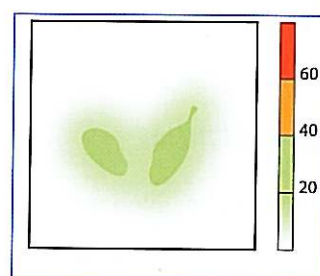

coussin galbé ALOVA

| Largeur d'assise cm | Largeur coussin cm | Profondeur coussin cm | Hauteur coussin cm | Poids maxi validé kg |
|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 38 à 40,5 cm        | 38                 | 41                    | 6,5                | 90                   |
| 40,5 à 43 cm        | 40,5               | 41                    | 6,5                | 90                   |
| 43 cm*              | 43*                | 43*                   | 6*                 | 90*                  |
| 43 à 45,5 cm        | 43                 | 44                    | 6,5                | 100                  |
| 45,5 à 50,5 cm      | 45,5               | 44                    | 7,5                | 110                  |
| > 50,5 cm           | 50,5               | 44                    | 7,5                | 120                  |

\* Coussin strictement proposé sans butée pelvienne