



# Loupes et loupes de lecture sur pied

## Loupes éclairantes system vario plus

Le système vario plus d'ESCHENBACH est synonyme de grande souplesse.

9 systèmes de grossissement de 2,8 x à 12,5 x et 5 variantes d'éclairage permettent de réaliser 45 combinaisons différentes et individuelles en fonction des besoins de chacun.

Le „plus“ pour l'utilisateur est que 14 éléments suffisent à réaliser toutes ces combinaisons.

Cela fait du système vario plus le système de loupes éclairantes disposant du plus grand nombre de variantes d'éclairage et de grossissements.

ESCHENBACH équipe le système vario plus depuis plus de 10 ans par éclairage au XENON éprouvé. Le gaz xénon dans l'ampoule assure un éclairage lumineux, uniforme et durable de l'objet. La longévité et la grande qualité de cette lumière font que ce type d'ampoules est utilisé dans divers autres domaines, par exemple dans les phares automobiles.

### Utilisation :

- Les loupes éclairantes conviennent en premier lieu à l'utilisation chez soi.
- Le système vario plus convient particulièrement aux utilisateurs incapables de tenir seuls les loupes (ex: à cause de tremblement dû à l'âge ou de la maladie de Parkinson).
- Etant donné que ces loupes reposent sur le papier et n'ont pas besoin d'être tenues en main, elles se destinent aux personnes qui lisent longtemps.
- Pour obtenir une distance de lecture uniforme, il convient d'utiliser system vario plus en combinaison avec un pupitre de lecture (1605 ou 1606, voir p. 66).

### Caractéristiques :

- De larges interrupteurs d'éclairage, de manipulation aisée et à fort contraste, facilitent la commande.
- Le matériau clair de têtes de loupes et leur forme fermée garantissent l'éclairage optimal du texte.
- Pour mieux suivre les lignes et améliorer ainsi les facultés de lecture, les têtes de loupe à partir de Ø 58 mm sont dotées d'une ligne de lecture rouge, escamotable.
- Toutes les têtes de loupes rectangulaires sont munies d'une lentille supplémentaire escamotable, en forme de segment.
- Toutes les loupes éclairantes Eschenbach sont calculées pour une distance uniforme de réglage ( $a_0$ ) de 400 mm. L'utilisation des loupes éclairantes se fait avec les lunettes de lecture.
- Toutes les têtes de loupe comportent le grossissement / la valeur dioptrique / la distance idéale d'utilisation oeil - lentille.
- L'adaptateur à réglage vertical, intégré dans toutes les poignées, permet d'ajuster la hauteur aux différentes têtes de loupe.
- Pour le choix en fonction des besoins individuels, de l'éclairage le mieux adapté, l'utilisateur dispose de 5 poignées différentes.



155773



155073



155173



155273



155393



155493



155993



158063



158263

Depuis 10 ans  
**xenon**  
LIGHT  
plus claire · plus limpide · meilleure



159910




15993



159940



159960

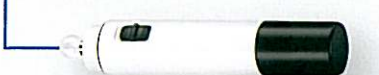

1591704