

L'embase Turny



La rotation de l'embase se fait manuellement et peut être exécutée, soit par une tierce personne, soit par l'utilisateur lui-même. La montée et la descente de l'embase sont électriques et s'actionnent à partir d'une télécommande filaire. La rotation électrique est possible en option.



L'embase Turny nécessite le remplacement du siège d'origine par un siège spécifique, avec ou sans accoudoirs. Elle a été testée à 150 kg.



L'embase Turny peut être positionnée à l'avant du véhicule, en position passager, ou bien à l'arrière du véhicule, du côté de la porte latérale coulissante (suivant le modèle du véhicule). Elle ne peut pas être placée en position conducteur, excepté sur la PEUGEOT 1007



L'embase Turny – embase pivotante à montée et descente électriques – est un système qui aide au transfert d'une personne dans un véhicule ou en dehors de celui-ci essentiellement lorsque l'assise d'origine du véhicule est trop haute. L'embase permet de présenter le siège passager en dehors du véhicule et à la hauteur souhaitée pour un confort de transfert (que la personne soit debout ou sur un fauteuil roulant).

 [agrandir](#)

