

DECAISSEMENT

Le décaissement de véhicules permet de transférer et de transporter une personne en fauteuil roulant dans un véhicule dont la hauteur intérieure n'est pas suffisante d'origine pour l'accueillir.

Le décaissement qui consiste à abaisser la partie centrale du plancher, présente l'intérêt d'offrir à une personne en fauteuil roulant l'accès à un véhicule qui, de par son volume, n'est pas destiné au transport d'une personne en fauteuil. La hauteur intérieure ainsi obtenue varie d'un véhicule à un autre (entre 1,41 m et 1,48 m). Le Fiat Doblo réhaussé fait exception : réhaussé d'origine, puis décaissé, ce véhicule offre une hauteur intérieure utile de 1,52 m. De même, la hauteur au passage de portes arrière se trouve accrue, variant de 1,38 m à 1,41 m selon le véhicule (1,42 m pour le Doblo réhaussé et décaissé). Grâce au décaissement, il n'est plus nécessaire d'avoir un véhicule volumineux pour transporter une personne assise dans son fauteuil roulant. Le transfert est simple et rapide.

Le décaissement se décline en deux versions :

- version avec rampe manuelle
- version avec rampe automatique (la rampe se déploie en même temps que l'arrière du véhicule s'abaisse grâce à un système d'abaissement hydraulique)

Dans le véhicule décaissé, la personne et son fauteuil sont maintenus par 4 fixations par enrouleurs et par une ceinture ventrale et une ceinture épaulière.

Suivant le véhicule, la roue de secours peut être conservée à l'intérieur du véhicule. Lorsque ce n'est pas le cas, une bombe anti-crevaisson est fournie. Le décaissement inclut aussi le remplacement de la banquette 3 places par 2 sièges individuels face route.

La gamme de véhicules pouvant être décaissés est vaste.

Contactez-nous pour toute question !

Doblo réhaussé décaissé avec rampe manuelle



 Agrandir



Kangoo décaissé avec rampe manuelle [Suite](#)



 Agrandir



Cliquez sur la vignette pour voir la photo