

Contact

KOBA Vision sprl


De Oude Hoeven 6
B 3971 Leopoldsburg
Belgique

Tél. +32 (0)11 344513
Fax +32 (0)11 348525
E-mail: info@kobavision.be

Plan d'accès

En voiture

- + Via l'autoroute E313
- + Sortie 25 Ham / Leopoldsburg
- + Vous atteindrez Heppen en suivant la direction de Leopoldsburg
- + Voir plan

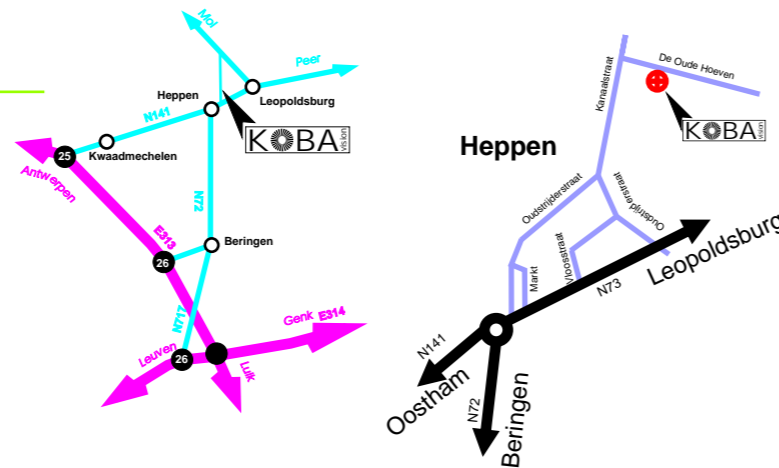

En train

- + Toutes les heures, un train quitte Anvers pour rejoindre Hasselt
- + Le transport depuis la gare jusque chez KOBA Vision est assuré par nos soins.

<http://www.kobavision.be>



Appareils de lecture



- + Facilité d'emploi
- + Son digital
- + Rapidité

Date de publication: mai 2006



KOBA Vision produit et distribue des outils d'aide pour les personnes mal- ou non-voyantes. L'expérience acquise au cours de plus de 15 années est mise au service de toutes les activités de la société. Le savoir-faire au niveau des télé-loupes et des appareils de lecture est continuellement amélioré et se retrouve dans tous les appareils produits. Les produits distribués par Koba Vision sont sélectionnés suivant des critères très pointus parmi lesquels la facilité d'emploi et la qualité constituent des points très importants. Koba Vision ne propose que des produits de qualité supérieure assortis d'un service après-vente parfait. Le service au client est et demeure prioritaire !

Produits



Télé-loupes



Les télé-loupes facilitent des activités telles que la lecture, l'écriture, la consultation d'images ou le bricolage.



Appareils de lecture



Les appareils de lecture énoncent des textes dans n'importe quelle langue souhaitée.



Systèmes d'agrandissement portables



Les systèmes portables permettent aux utilisateurs de disposer de systèmes d'agrandissement à n'importe quel endroit.



Applications-PC



Les applications-PC offrent aux personnes non voyantes ou mal voyantes la possibilité d'accéder à n'importe quel ordinateur.



Une assistance au quotidien



Les outils d'aide facilitent la vie quotidienne. C'est le cas par exemple, des thermomètres et balances parlantes.



L'EasyReader en 5 versions.

EasyReader (appareil standard)	€ 2.690,00
EasyReader + Lecteur Daisy	€ 2.890,00
EasyReader + Lecteur Daisy + Clavier de commandes	€ 3.490,00
EasyReader + Lecteur Daisy + Clavier de commandes + Tablette	€ 3.680,00
EasyReader + Lecteur Daisy + Clavier de commandes + Ecran tactile	€ 4.280,00

Sous réserves de modifications des prix et spécifications techniques. Les prix s'entendent TVA et taxe récupel incluses.

Service

Garantie

1 an de garantie sur site

Les appareils de KOBA bénéficient d'une garantie totale de un an sur les pièces et la main d'œuvre.

Livraison

Livraison et installation à domicile.

Tous les appareils de Koba sont livrés et installés à domicile. En outre, une explication détaillée de leur fonctionnement est donnée afin qu'ils puissent être utilisés immédiatement.

Période d'essai

Dépôt à l'essai

Koba n'impose aucune décision immédiate quant à l'achat du matériel.

Démonstration

Démonstration à domicile

Vous souhaitez peut-être faire connaissance avec un appareil Koba mais vous ne pouvez pas vous déplacer? Demandez sans aucun engagement de votre part, une démonstration à votre domicile.

Options



Appareils de lecture

Nouveau! Ecran tactile (pour une personne mal-voyante)



Si l'usage d'une simple Télé-Loupe devient trop fatigant ou si la vision se réduit, l'écran tactile peut être la solution idéale !

L'écran tactile commence la lecture du texte à l'endroit indiqué par le doigt. Une recherche peut être effectuée vers des mots tels que, signature dans une lettre, total dans une facture, etc... Un mot peut être trouvé en faisant appel au système de recherche. Un signal sonore modulé indique le chemin d'accès au mot recherché. D'autres signaux sonores indiquent l'emplacement des photos et des espaces vides.

Pour mieux percevoir les photos et les textes, on peut faire appel aux fonctions d'agrandissement. L'écran peut être adapté à des feuilles en mode paysage (horizontal) ou en mode portrait (vertical).

Sur le côté de l'écran se trouvent les boutons de commandes des axes de coordonnées, du mode recherche, de la navigation et de l'agrandissement.

+ Un effleurement de l'écran permet de situer la mise en page: textes, photos, espaces vides, colonnes, ...



Vue d'ensemble

Sous réserves de modifications des prix et spécifications techniques.

	EasyReader	EasyReader + Lecteur Daisy	EasyReader + Lecteur Daisy + Clavier à fonctions	EasyReader + Lecteur Daisy + Clavier à fonctions + Tablette	EasyReader + Lecteur Daisy + Clavier à fonctions + Ecran tactile
Fonction d'aide de Koba	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Modes de lecture	- mot - ligne - phrase - page - épeler	- mot - ligne - phrase - page - épeler	- mot - ligne - phrase - page - épeler	- mot - ligne - phrase - page - épeler	- mot - ligne - phrase - page - épeler
Vitesse de lecture	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Son	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Lecteur Daisy	-	x	x	x	x
Recherche de termes	-	-	x	x	x
Fonction de mémoire	-	-	x	x	x
Système de recherche	-	-	-	x	x
Vitesse	28 sec	28 sec	28 sec	28 sec	28 sec (noir-blanc) 2 min (couleurs)
Poids	9 kg	10 kg	12kg	13 kg	18 kg
Connexions	2x USB Raccordement casque	2x USB Raccordement casque	2x USB Raccordement casque	2x USB Raccordement casque	2x USB Raccordement casque

EasyReader




Appareils de lecture



L'EasyReader est l'appareil de lecture le plus facile d'utilisation proposé sur le marché. Sa conception moderne et simplifiée en fait un appareil que chaque utilisateur peut utiliser en un tour de main. .

+ **Rapidité**
L'EasyReader scanne rapidement toutes les pages. Il peut ainsi déjà lire sa première page après seulement 28 secondes.

+ **L'appareil le plus simple au monde**
Le nombre de boutons de commandes est réduit au minimum bien que l'EasyReader soit équipé des fonctions les plus importantes. Régler le volume et la vitesse de lecture, parcourir le texte, ... tout est possible d'une seule pression sur le bouton.

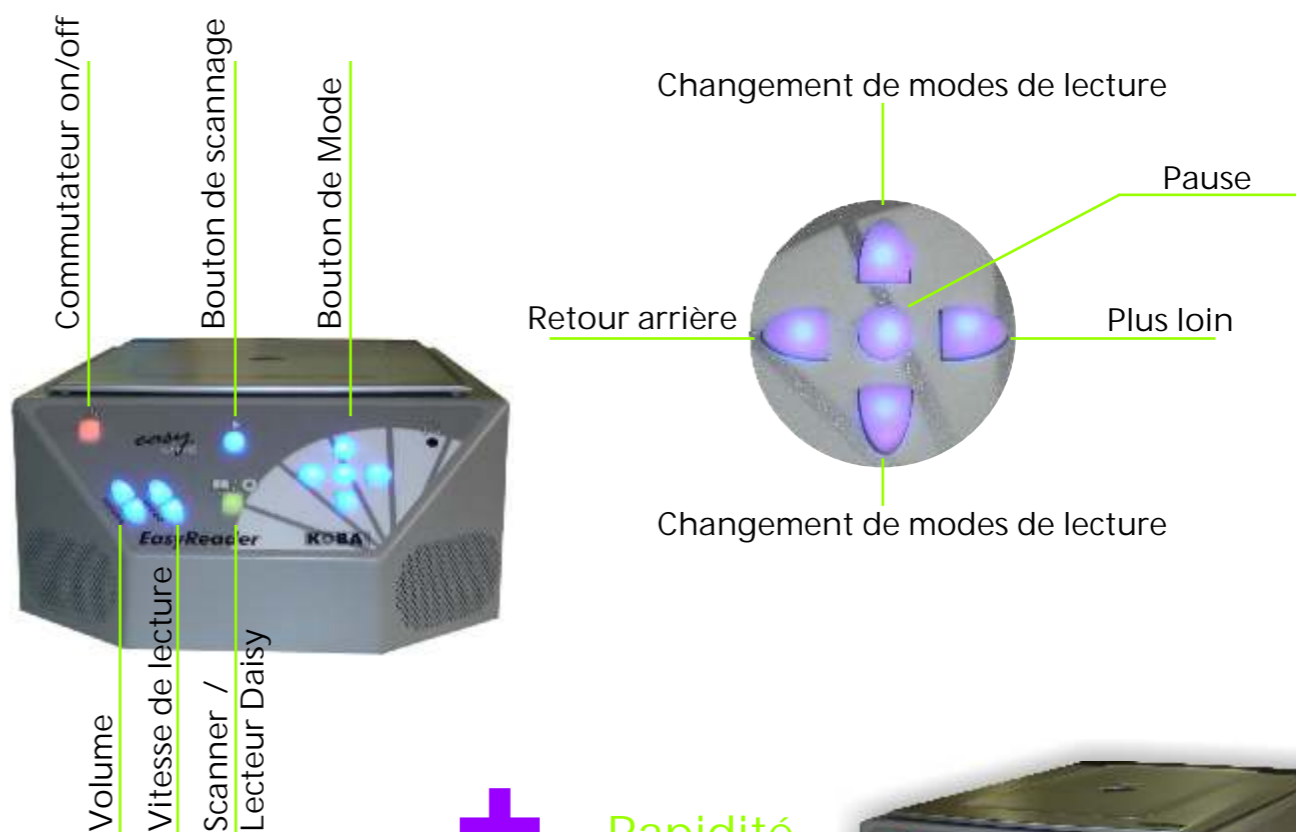

+ **Rapidité**
+ **Simple**




EasyReader



Appareils de lecture

+ Son digital
L'EasyReader prend soin de l'audition grâce au son digital. Il veille à assurer un son très pur sans aucun crissement.

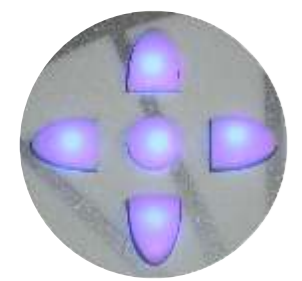

+ Mode lecture
L'EasyReader prévoit différents stades de lecture du texte. L'utilisateur peut opter pour une prononciation par mots, par lignes, par phrases, par pages ou par caractères.

+ Innovation
L'EasyReader n'est pas un produit de masse mais un appareil à haute technologie qui ne peut être produit que sur commande. Cela offre l'avantage de disposer toujours des éléments et des logiciels de commande les plus actuels. L'EasyReader a été complètement développé par Koba Vision, est assemblé à la main et subit un strict contrôle au niveau de la qualité. Ceci permet à Koba Vision d'adapter complètement l'EasyReader aux besoins du client.

+ Langues
L'EasyReader effectue la lecture des textes en 4 langues offrant chacune un choix de 7 prononciations différentes.

- + Rapidité**
- + 4 langues, 7 prononciations**
- + Simplicité**
- + Son digital**
- + Différents modes de lecture**



Options



Appareils de lecture

+ Lecteur Daisy
L'EasyReader peut être, en option, équipé d'un lecteur Daisy intégré. Le lecteur Daisy permet l'écoute de livres audio avec la facilité de fonctionnement propre à l'EasyReader.



Nouveau Options EasyReader Live

- A l'aide d'un clavier spécial, rechercher des mots-clés programmés (par ex. total, montant, ...)
- Via un signal sonore modulé, rechercher le mot se trouvant à l'endroit où l'appareil de lecture s'est arrêté (écran tactile, tablette)
- Chercher des mots dans une feuille normale, par ex. « signature » et pouvoir ainsi apposer sa signature à l'endroit ad hoc (tablette).
- Un non-voyant peut donc en toute indépendance signer une lettre
- Obtenir la lecture de l'orientation de la page
- Parcourir sur un mode graphique (vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite)
- Obtenir la lecture des axes de coordonnées d'un mot
- Rechercher des mots à l'aide d'un signal sonore
- Rechercher des photos et des espaces vides à l'aide de différents signaux sonores.

Nouveau! Clavier à fonctions

Recherche de mots-clés
Sonde tout document avec la fonction de recherche. Chaque mot-clé programmé peut être retrouvé avec une touche de raccourci. L'appareil peut enregistrer jusqu'à 100 mots-clés répartis en 10 groupes qui renvoient directement à, par exemple, un numéro d'extrait, le total d'une facture, une date...

Enregistrement de pages scannées
Les textes scannés peuvent être conservés sur le disque dur interne ainsi que sur un lecteur Mp3 ou un clé USB.



Nouveau! Tablette (pour un non-voyant)

C'est un nouveau monde qui s'ouvre à une personne non-voyante: elle peut maintenant décrypter une feuille imprimée et déceler l'emplacement du texte ou celui des photos ou des espaces vides.

Le texte scanné est déposé sur une tablette spécifique. Pour déposer la feuille comme il se doit, il est possible de demander d'abord (avec le bouton d'orientation de page) comment se trouvait la feuille sur le scanner. La position de départ est indiquée en déplaçant un stylo spécial au-dessus de la page. Dans le mode recherche, la position d'un mot est détectée via un signal sonore modulable. La fréquence du signal s'accélère à proximité du mot. Une pression du stylo sur la page induit l'énoncé de l'objet qu'il soit une photo, un texte ou un espace vide. Sur le côté de la tablette se trouvent des boutons servant au mode recherche, orientation de page, axes de coordonnées et navigation..

