

# HYDRESCARRE II<sup>®</sup>



Réf. : 1126 • Matelas Hydrescarre II.

MATELAS



## DESCRIPTION

Le support est composé d'un matelas en mousse de polyuréthane creusée afin d'y placer 1 à 2 modules à eau. Cette méthode est très efficace pour prévenir les escarres.

### Principe :

L'association de la mousse haute résilience et de l'eau contribue à la légèreté et à l'efficacité du matelas.

### Le matelas est livré avec :

- 2 modules à eau.
- 1 housse intégrale en PVC, anti bactérien et anti fongique.
- 1 kit de remplissage.

### Facilité de mise en place :

- Sa conception est simple et originale, de plus l'installation se fait rapidement sur tous les lits.
- Poser 1 ou 2 modules suivant les besoins sur la housse étanche.
- Le niveau de remplissage des modules est inversement proportionnel au poids du patient.
- En cas de fuite, l'eau restera dans la cuvette de la mousse qui est protégée par une housse imperméable.

### Nettoyage, désinfection :

- Des modules : à l'eau savonneuse ou avec des solutions détergentes et désinfectantes de surface marquées NF aux concentrations prévues par le fabricant.
- De la housse : lavage à 90 °c, essorage modéré, séchage à chaud et repassage déconseillés.
- Afin d'éviter toute prolifération bactérienne dans l'eau, il est recommandé d'y ajouter une cuillère à café d'eau de Javel.

## CARACTÉRISTIQUES

Poids minimum et maximum du patient admissible tout en maintenant l'efficacité du support

- Minimum : 40 kg.
- Maximum : 80 kg.

Dimensions standard : 195 x 88 x 14 cm.

Protection intégrale : PVC.

Poids : 5 kg avant remplissage et environ 40 kg avec 2 modules pleins.

Garantie : 1 an.

Référence Escarius : 1126. Matelas Hydrescarre II.

LPP : 1233433

Classe : 1