

Monte-escalier adaptable

Découvrez la liberté de mouvement

Liftkar PT Adapt 130/160

Si vous désirez utiliser votre nouveau Liftkar PT avec votre propre fauteuil roulant, un atelier agréé Sano vous fournira les adaptateurs nécessaires.

Désormais, vous êtes mobile!

Avec ce modèle, il n'est pas nécessaire de retirer le monte-escalier pour utiliser le fauteuil roulant. Il suffit de relever le Liftkar PT et de remettre les roues du fauteuil en place pour pouvoir se déplacer comme d'habitude (avec le monte-escalier).



ÉTAPE 1

Placez le Liftkar sous le fauteuil roulant et engagez-le dans le système de fixation.



ÉTAPE 2

Soulevez le fauteuil roulant en levant le Liftkar PT.



ÉTAPE 3

Retirez les roues du fauteuil roulant.



ÉTAPE 4

Insérez les roues dans les logements prévus à cet effet (uniquement sur PT-Plus), terminé!