



- **Fixation au mur** de la douche.
- Assise en mousse polyuréthane (blanc ou gris) ou fibre de verre (gris).
- Assise forme classique (ronde). Disponible également avec une découpe en U (échancré), uniquement en gris.
- **Design** sobre.
- Charge maximum : 150kg.

Caractéristiques techniques du strapontin de douche "Swing" de ERLAU :

- Assise de grande surface, en polyamide renforcé fibre de verre ou en mousse polyuréthane.
- Le système de freinage réglable empêche l'ouverture inopinée de l'assise, et ceci dans n'importe quelle position.
- En position relevée, l'encombrement est de 55 mm.
- Fixation murale en aluminium anti corrosion revêtu de polyamide.
- Livré avec plaque de fixation (les 4 vis de fixation 7/8 mm ne sont pas livrées).
- Charge admissible maximale 150 kg.

Modèles disponibles

- Assise mousse polyuréthane + couleur intégrale blanche (assise + structure) + assise classique
- Assise mousse polyuréthane + couleur intégrale grise (assise + structure) + assise classique
- Assise fibre de verre + couleur intégrale grise (assise + structure) + assise classique
- Assise mousse polyuréthane + couleur intégrale grise (assise + structure) + assise en U

Données techniques :

- Charge admissible : 150 kg sur l'ensemble de la surface d'assise.
- Hauteur d'assise: env. 480 mm.
- Profondeur: 460 mm.
- Poids: environ 4 kg.

Montage de la plaque de fixation:

- Les trous de fixation supérieurs (hauteur h) se situent 50 mm sous la hauteur d'assise souhaitée (H)
- La hauteur d'assise H conseillée est de 480 mm.
- La portance et la solidité du support, le système de fixation, ainsi que le système de construction caché (système arrière invisible) doivent être conçus de manière telle, que le strapontin de douche une fois installé puisse supporter une charge de 1 KN (= 100 kg)
- Les trous de la plaque de fixation ont un diamètre de 11 mm.
- Définir le diamètre des trous en fonction du matériel de fixation.
- Marquage et perçage des 3 trous de fixation.
- Attention: veiller à ce qu'il n'y ait pas de robinetteries ou autres éléments dans la zone de rabattement du siège.

Montage du strapontin

- Positionner la plaque de fixation (1) horizontalement et visser fortement. Accrocher le strapontin sur la plaque de fixation. Serrer les goujons filetés (2).
- Appliquer une force sur l'assise du strapontin et resserrer les goujons filetés.
- Réglage de la force de freinage et conseils d'entretien.
- Réglage de la force de freinage.
- Resserrer les vis de réglage (3):
Vers la droite = freinage plus intensif
Vers la gauche = freinage moins intensif

NB :

Le montage doit être effectué par du personnel qualifié.

L'entretien et le nettoyage se font à l'aide des produits et désinfectants courants.

Ne pas utiliser de nettoyeurs pour sol.