

## Minivator 1000

### Monte-escalier droit, Minivator 1000

Le Minivator 1000 est un monte-escalier droit : il est conçu pour les escaliers droits, c'est-à-dire des escaliers qui ne tournent pas.

Le monte-escalier marche sur un rail mince qui est fixé sur le bord de l'escalier et par conséquent qui n'est pas encombrant, permettant aux autres usagers d'utiliser l'escalier sans difficulté.

Le rail est fourni avec deux points de charge, un en haut et un en bas. Lorsque vous ne vous servez pas du monte-escalier, laissez-le sur l'un ou l'autre des points de charge. D'une manière générale, les points de charge se situent à l'endroit où le siège s'arrête. Si, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de garer le siège à un autre endroit sur le rail, par exemple si vous avez un rail relevable, c'est possible en utilisant la touche "park" de la télécommande. Le fait de garer le siège sur un point de charge permet à la batterie de se recharger automatiquement et par conséquent de fonctionner normalement, même durant une panne de courant.

Le modèle Slimline s'applique également au fauteuil du monte-escalier. Le monte-escalier peut se plier afin de prendre le moins de place possible lorsqu'il n'est pas en service. Un repose-pieds repliable automatique permet aux usagers qui ont des difficultés à se baisser de plier le siège sans effort.

Le Minivator 1000 est très facile à utiliser. Il y a une clé de contact et, une fois le monte-escalier en route, il suffit de pousser la manette de commande vers la direction souhaitée.

Une fois arrivé en haut de l'escalier, faites pivoter le siège vers le palier afin que vous puissiez vous lever avec aisance. Il est possible de choisir un siège qui pivote automatiquement pour vous faciliter la tâche encore plus.

Deux types de sièges sont disponibles pour le modèle Minivator 1000 et vous avez un choix de coloris. La manette de commande peut être placée sur l'accoudoir de gauche ou de droite.

Si votre escalier a un palier à angle droit (90°) avec quelques marches supplémentaires vers le palier supérieur, vous avez peut-être la possibilité de faire installer une plate-forme élévatrice.

Lorsque le fauteuil est arrivé à destination, la plate-forme se rabat pour former une passerelle entre le fauteuil et le palier. L'utilisateur peut ainsi descendre du monte-escalier et marcher directement sur le palier. Ce système marche aussi dans l'autre sens, lorsque vous utilisez le siège pour descendre.

Le Minivator 2000 courbe est conçu pour les escaliers tournants (90° ou 180°) ou escaliers en spirale.

