

Minivator 2000

Monte-escalier tournant, Minivator 2000

Le Minivator 2000 est un monte-escalier courbe ou tournant. Ce type de monte-escaliers est conçu pour les escaliers à virage ou en spirale.

Le rail est monté sur des colonnes qui sont fixées à l'escalier. Chaque rail Minivator est fait sur mesure, suite à une inspection approfondie de l'escalier en question. Nos ingénieurs préparent le rail le mieux adapté à l'escalier tout en économisant le maximum d'espace.

Le rail peut être placé côté mur ou côté rampe. Le Minivator 2000 est le monte-escalier sur le marché qui prend le moins de place dans les courbes. Ceci veut dire que très souvent le Minivator 2000 pourra être utilisé dans les halls où d'autres monte-escaliers ne rentrent pas.

D'une manière générale, le rail a deux points de charge, un en haut et un en bas. Ceci dit, il se peut que certains rails aient également besoin de points de charge intermédiaires. Lorsque le monte-escalier n'est pas en service, il doit être garé sur un des points de charge. Les points de charge se trouvent en principe à l'endroit où le fauteuil s'arrête. Si, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de garer le siège à un autre endroit sur le rail, par exemple si vous avez un rail relevable, c'est possible en utilisant la touche "park" de la télécommande. Le fait de garer le siège sur un point de charge permet à la batterie de se recharger automatiquement et par conséquent de fonctionner normalement même durant une panne de courant.

Le modèle Slimline s'applique également au fauteuil du monte-escalier. Le monte-escalier peut se plier afin de prendre le moins de place possible lorsqu'il n'est pas en service. Un repose-pieds repliable motorisé permet aux usagers qui ont des difficultés à se baisser de plier le siège sans effort. Vous pouvez replier le repose-pieds en appuyant sur un bouton situé sous l'accoudoir du siège ou en pliant le siège vous-même.

Le Minivator 2000 est très facile à utiliser. Il y a une clé de contact et, une fois le monte-escalier en route, il suffit de pousser la manette de commande vers la direction souhaitée.

Une fois arrivé en haut de l'escalier, faites pivoter le siège vers le palier afin que vous puissiez vous lever avec aisance. Il est possible de choisir un siège qui pivote automatiquement pour vous faciliter la tâche encore plus.

Deux types de sièges sont disponibles pour le modèle Minivator 2000 et vous avez un choix de coloris. La manette de commande peut être placée sur l'accoudoir de gauche ou de droite.

