



Alarmes et réveil matin

WAKE est une alarme sonore et un réveil matin pour les personnes présentant une perte auditive. WAKE permet à ces personnes de savoir si une alarme retentit, par activation d'un vibreur. Même si WAKE peut se brancher à une prise électrique murale, nous recommandons l'utilisation des piles, en cas de coupure de courant.

Placer WAKE sur la table de nuit à proximité du réveil, et le vibreur sous l'oreiller. Le microphone intégré à WAKE captera la sonnerie du réveil et le convertira en vibrations. D'autre part, grâce au récepteur FM intégré, la personne pourra alors "entendre" l'alarme incendie. Le type de vibrations est fonction de l'alarme captée, facilitant ainsi à l'utilisateur la reconnaissance de l'alarme.

Le microphone du WAKE capte les fréquences aux alentours de 600 Hz et sa sensibilité peut être ajustée pour éviter les fausses alertes.

Souplesse

WAKE peut être utilisé seul pour le réveil, ou en association avec une unité DETECT ou avec un OBSERVER. Le vibreur du WAKE informe alors l'utilisateur d'une variété d'alarmes: la sonnerie du téléphone, la sonnette de la porte, les pleurs d'un bébé, etc.

Données techniques

- Sensibilité du microphone: 45 dB SPL à partir de 600 Hz. Peut être réglée.
- Transmission du signal: par FM (fréquence: 433,92 MHz)
- Programmation: 16 possibilités
- Sortie: vibreur
- Vibration: de 7 types différents
- Alimentation: 12 V AC / DC 20 W
- Dimensions: 36 x 85 x 110 mm
- Couleur: noir
- Présentation: plastique

Accessoires

- Réveil
- Batterie de sécurité

